

ObesChip®

Contenido del Kit

- 1 Escobillón identificado para la recogida de muestra
- 1 Documento de instrucciones F-1755
- 1 Documento de consentimiento informado F-1756
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit

Nº Análisis

Instrucciones para el cliente



1

Lea detenidamente, cumplimente y firme el documento de consentimiento informado.




2

No debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra.



3

Lea detenidamente las instrucciones de uso del contenedor para la recogida de muestra. Introduzca el escobillón en la boca y frote con firmeza la parte interna de la mejilla, unas 10 veces cada lado. A continuación, colóquelo dentro del tubo y ciérrelo.

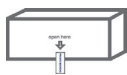

4

Coloque la muestra en el kit junto al consentimiento informado firmado. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



5

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel. 934 578 866)** indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.

* Debe enviar el kit en las 24 horas siguientes a la toma de la muestra.

** El horario de recogida se establecerá en el intervalo de una hora de las siguientes franjas horarias: de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.



6

Le avisaremos por e-mail cuando hayamos recibido la muestra y usted podrá seguir el estado de su pedido en todo momento en echevarne-shop.com