




## Intolerancia Alimentaria


### Contenido del Kit

- 1 Lanceta automática
- 1 Papel absorbente
- 1 Documento de instrucciones F-1807
- 1 Documento de solicitud de análisis
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Albarán de envío
- 1 Sobre de retorno del kit


Nº Análisis

- 

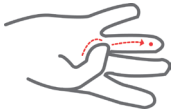
1

Lea detenidamente estas instrucciones.
- 

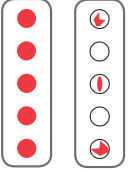
2

Lávese las manos con agua y jabón y aclare abundantemente con agua. Desinfecte la yema del dedo anular con alcohol y deje secar la piel.
- 


3

Gire el cabezal verde de la lanceta y retírelo. A continuación, tense la zona a pinchar y pínchela.
- 


4

Realice un masaje en el dedo en dirección al lugar de punción para que se forme una gota grande de sangre.  
*No apriete la zona que rodea el lugar de punción.*
- 

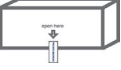
5

Haga caer 5 gotas de sangre en un círculo. Repita el proceso cuatro veces más hasta rellenar cinco círculos.  
*Compruebe que la sangre ha llenado todo el círculo y que ha traspasado completamente la cara posterior del círculo.*
- 


6

Deje secar completamente la sangre a temperatura ambiente (2 horas).
- 

7

Coloque la muestra en el kit junto al documento de solicitud de análisis. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.
- 

8

Rellene con sus datos los campos del remitente en el albarán y llame a **MRW (Tel: 934 578 866)** indicando **nº de abonado 2075** para gestionar la recogida.
- 

9

Entregue este documento al cliente ya que el número de análisis indicado en la parte superior se le solicitará para la consulta de resultados.
- 